




MK DENTAL

flexible, just like you



Catálogo de Productos

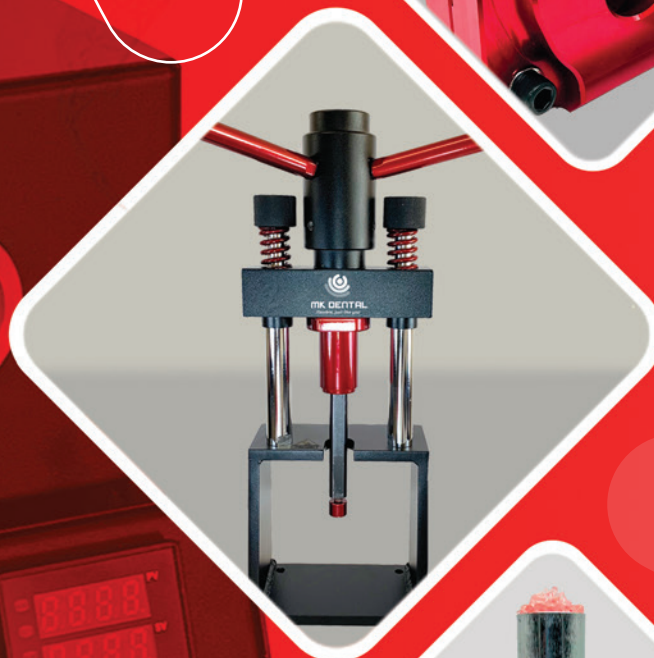

Nuestra Empresa

MK Dental es una empresa dedicada en la elaboración de materiales y fabricación de equipos para prótesis flexibles, que continua en constante crecimiento y actualización.

MK Dental inició con el proyecto del primer horno doble para prótesis flexibles de todo el mercado, que con el paso del tiempo a crecido y actualmente cuenta con todo lo necesario para la elaboración de prótesis flexibles.

Actualmente MK Dental vende en todo el territorio mexicano y a la vez nos hemos estado expandiendo constantemente en el mercado latinoamericano, así hasta llegar a otras partes del mundo, gracias a nuestros distribuidores que nos apoyan a proveer los materiales y equipos en su zona, a la vez ofreciendo asesoría y capacitación constantemente.

Hasta el día de hoy contamos con 2 materiales flexibles (MK nylon y MK flex), también contamos con 2 materiales semiflexibles (MK acrylic y MK impact), seguiremos creciendo hasta llegar a ser los mejores materiales del mercado ofreciendo productos de calidad.



mk DENTAL
flexible, just like you


Equipos	1
Resinas	4
Accesorios	8
Pulido	10
Ceras	14
Contáctenos	16

Equipos

Diseño moderno e ingeniería de punta para lograr resultados increíbles, la mayor seguridad y confianza al crear sus prótesis y con garantía que respalda la calidad de nuestros productos.



Equipos

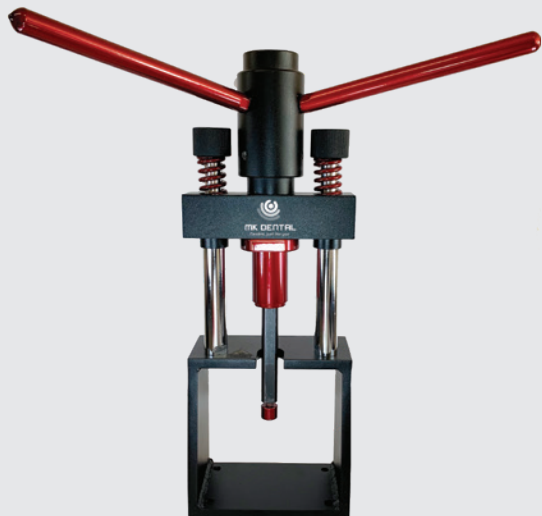

PRENSA MANUAL

- Fácil de usar (poco mantenimiento)
- Requiere: (Horno digital MK).
- 2 años qarantía.

ARTÍCULO E02-01



HORNO DIGITAL SENCILLO

- Porta cartuchos (acero inoxidable).
- Bronce.
- Temporizador.
- Cable de alimentación.
- Ideal para laboratorios con producción regular.
- Disponible 110v o 220v
- 2 años garantía.

ARTICULO E03-02



HORNO DIGITAL DOBLE

- 2 Porta cartuchos (acero inoxidable).
- 2 Bronce.
- 2 Temporizador.
- Cable de alimentación.
- Ideal para laboratorios con alta producción.
- Disponible 110v o 220v
- 2 años garantía.

ARTICULO E01-04

Kits Equipos



Kit básico sencillo

- Prensa Manual MK
- Horno digital sencillo MK
- Porta cartuchos (acero inoxidable).
- Bronce.
- Temporizador.
- Spray Desmoldante.
- Mufla de aluminio (M*).
- 10 Med. MK Flex std. pink.
- 5 Lg. MK Acrylic std. pink.
- Muestra MK super shine.
- Cable de alimentación.
- Ideal para laboratorios con producción regular.
- Disponible 110v o 220v
- 2 años garantía.

ARTICULO E04-01

Kit completo doble

- Prensa Manual MK
- Horno digital doble MK
- 2 Porta cartuchos (acero inoxidable).
- 2 Bronce.
- 2 Temporizador.
- Spray Desmoldante.
- 2 Mufa de aluminio (a elegir: M* o XL*).
- 15 Med. MK Flex std. pink.
- 15 Lg. MK Acrylic std. pink.
- 1 Caja lingual bar.
- 1 Caja sprue wax.
- MK super shine.
- Brown tripoli MK.
- Rag buff (algodón).
- Rag buff (amarilla).
- Buff polish wheel MK.
- Cable de alimentación.
- Ideal para laboratorios con alta producción.
- Disponible 110v o 220v
- 2 años garantía.

ARTICULO E06-01

Kit básico doble

- Prensa Manual MK
- Horno digital doble MK
- 2 Porta cartuchos (acero inoxidable).
- 2 Bronce.
- 2 Temporizador.
- Spray Desmoldante.
- Mufla de aluminio (a elegir: M* o XL*).
- 10 Med. MK Flex std. pink.
- 5 Lg. MK Acrylic std. pink.
- Muestra MK super shine.
- Cable de alimentación.
- Ideal para laboratorios con alta producción.
- Disponible 110v o 220v
- 2 años garantía.

ARTICULO E05-01

Resinas

Material de inyección flexibles y semi-flexibles de gran calidad para crear prótesis perfectas que se ajustan a cada necesidad.



Resinas



CUBETAS DE RESINA

- 250g.
 - 500g.
 - 1kg.
- Disponible en:
- MK Nylon
 - MK Flex
 - MK Acrylic
 - MK impact

ARTICULO C01-250
ARTICULO C02-500
ARTICULO C03-1000



CARTUCHOS VACIOS

- 25 mm diámetro
- Cartucho vacío med. (M)
- Cartucho vacío Largo (L)
- Cartucho vacío Extra (XL)

ARTICULO R05-01M
ARTICULO R06-01L
ARTICULO R07-01XL

Resinas Usos


Nylon

FLEXIBLE

Es un termoplástico de nylon. Material irrompible, memoria elástica, hipoalergénico, confortable, con muy buena translucidez que asemeja la encía natural. **Ideal para:** prótesis bilaterales, unilaterales y/o combinados con metal, apoyos metálicos y/o casos que no requieran modificaciones a corto plazo. No se recomienda en dentaduras completas. **Disponible en color:** Light Pink y Std. Pink.

Indicaciones de inyección:

- 1-Precalentar el cartucho por lo menos 30 min. arriba del horno.
- 2-Colocar el cartucho por 11 mins. a 287°C o 550°F o 15 mins. a 248°C o 480°F
- 3-Inyectar con mufla fría o temperatura ambiente (usar guantes resistentes al calor).
- 4-Se recomienda usar prensa manual y horno digital.
- 5-Esperar por lo menos 6-8 mins. prensado para asegurar que el material enfrió lo suficiente para abrir la mufla.

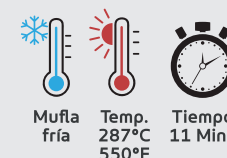

Flex


Es una poliolefina. Material clínicamente irrompible, confortable, excelente ajuste, hipoalergénico, fácil de terminar y pulir.

Ideal para: prótesis bilaterales, unilaterales y/o combinados con metal, apoyos metálicos y/o casos que no requieran modificaciones a corto plazo. No se recomienda en dentaduras completas.

Disponible en color: Light Pink y Std. Pink.

Indicaciones de inyección:

- 1-Precalentar el cartucho por lo menos 30 min. arriba del horno.
- 2-Colocar el cartucho por 11 mins. a 287°C o 550°F o 15 mins. a 248°C o 480°F
- 3-Inyectar con mufla fría o temperatura ambiente (usar guantes resistentes al calor).
- 4-Se recomienda usar prensa manual y horno digital.
- 5-Esperar por lo menos 6-8 mins. prensado para asegurar que el material enfrió lo suficiente para abrir la mufla.

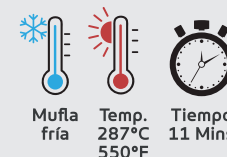

Acrilic

SEMI-FLEXIBLE

Es un acrílico inyectado. Semi-flexible compatible con acrílico convencional, fácil de terminar y pulir, no sufre contracción, translucidez, ligero y comfortable. **Ideal para:** Dentaduras completas, unilaterales, combinados con metal, apoyos metálicos y/o casos que requieran modificación a corto plazo. **Disponible en color:** Std. Pink (traslucido) y Clear.

Indicaciones de inyección:

- 1-Precalentar el cartucho por lo menos 30 min. arriba del horno.
- 2-Colocar el cartucho por 20 mins. a 300°C o 575°F también 20 mins. a 287°C o 550°F.
- 3-Inyectar con mufla caliente (usar guantes resistentes al calor).
- 4-Se recomienda usar prensa manual y horno digital.
- 5-Esperar por lo menos 6-8 mins. prensado para asegurar que el material enfrió lo suficiente para abrir la mufla.




Impact

SEMI-FLEXIBLE

Es una combinación de resina acromática termoplásticas de alto impacto. Muy fácil de terminar y pulir, resistente al impacto translucidez, ligero y confortable, excelente terminado y alto brillo. **Ideal para:** Dentaduras completas, unilaterales, combinados con metal, apoyos metálicos y/o casos que requieran modificación a corto plazo. **Disponible en color:** Std. Pink (traslucido) y Clear.

Indicaciones de inyección:

- 1-Precalentar el cartucho por lo menos 30 min. arriba del horno.
- 2-Colocar el cartucho por 20 mins. a 248°C o 480°F.
- 3-Inyectar con mufla tibia (usar guantes resistentes al calor).
- 4-Se recomienda usar prensa manual y horno digital.
- 5-Esperar por lo menos 8 mins más. prensado para asegurar que el material enfrió lo suficiente para abrir la mufla.

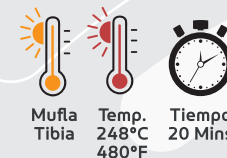

Accesorios

Utilizar los mejores accesorios garantizan un mejor resultado a la hora de crear tus prótesis dentales. Diseños modernos e ingeniería de punta elaborados por MK Dental.



Accesorios



MUFLA CHICA (S)

- Mufla chica ideal para casos pequeños y/o unilaterales.
- Aluminio anodizado.
- Bujes acero inoxidable.
- Incluye llave allen L.
- 4 tornillos.

ARTICULO M07-01



MUFLA REGULAR (M)

- Mufla tamaño regular ideal para todo tipo de casos.
- Aluminio anodizado.
- Bujes acero inoxidable.
- Incluye llave allen L.
- 4 tornillos.

ARTICULO M08-01



MUFLA DOBLE (XL)

- Mufla doble ideal para casos grandes o para reducir tiempo al enmuflar 2 o más casos.
- Doble entrada.
- Aluminio anodizado.
- Bujes acero inoxidable.
- Incluye llave allen L.
- 4 tornillos.


ARTICULO M09-01



SPRAY DESMOLDANTE

- Desmoldante de alta temperatura grado alimenticio.
- 12oz.

ARTICULO A13-01

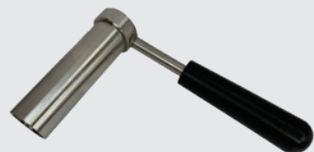

PORTA CARTUCHOS

- Porta cartuchos de acero inoxidable.

ARTICULO A10-01



BRONCES

- Tope de bronce 1/4".
- Tope de bronce 3/4".

ARTICULO A11-01

ARTICULO A11-02



TEMPORIZADOR

- Temporizador digital.
- Requiere batería AA (no incluye batería).

ARTICULO A12-01

ARTICULO A12-02



FUSING LIQUID

- Líquido para reparación de flexibles.
- 5ml.

ARTICULO A14-01

Pulido

Acabado espectacular para lograr superficies de prótesis ideales para el confort de cada paciente. Con la garantía MK Dental con calidad internacional.



Kit Pulido




Kit de pulido MK

- Para toda clase de flexibles, semiflexibles y acrílicos

ARTICULO P24-04

Pulido

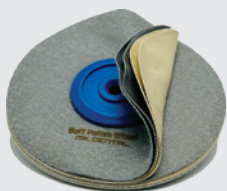

BUFF POLISH WHEEL

- Rueda para pulir flexibles, semiflexibles y acrílicos.
- Usarlo con policril, óxido de aluminio o tierra pomex.
- Ayuda a un pulido más rápido

ARTICULO P19-01



RAG BUFF

Rueda de trapo amarilla:

Ideal para:

- Pulido final con Brown tripoli MK.

Disponible en:

- Rag buff con costuras.

ARTICULO P20-01



RUBBER WHEELS

- Discos de goma para terminado y alisado.
- Facilita el pulido.

Disponible en:

- 100 piezas.
- 50 piezas.

ARTICULO T17-01

ARTICULO T17-02



ABRASIVE RUBBER WHEEL

- Disco abrasivo para terminar flexibles.

Disponible en:

- Disco delgado (3" diametro).
- Disco grueso (3" diametro).

ARTICULO T18-01

ARTICULO T18-02



RAG BUFF

Rueda de trapo de algodón:

- Para abrillantar usando Super shine MK.

Disponible en:

- Rag buff con costuras.
- Rag buff sin costuras.

ARTICULO P22-01

ARTICULO P22-02



BROWN TRIPOLI

- Pasta café para pulido final.
- Ayuda a la eliminación de rayas que no logra quitar el policril.
- Pulido en seco.

ARTICULO P21-01



SUPER SHINE

Rueda de trapo de algodón:

- Para abrillantar usando Super shine MK.

Disponible en:

- Rag buff con costuras.
- Rag buff sin costuras.


ARTICULO P22-01

ARTICULO P22-02

Pulido Usos



BUFF POLISH WHEEL

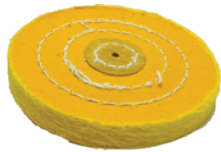

RAG BUFF



BROWN TRIPOLI



RAG BUFF



SUPER SHINE



Ceras



LINGUAL BAR

Cera barra lingual:

Ideal para:

- Encerados de prótesis flexibles ganchos, barra lingual, y zona vestibular.
- Ayuda a tener un encerado más rápido y limpio.

Disponible en:

- Caja 1 lb.
- Caja ½ lb.

ARTICULO C15-01

ARTICULO C15-02



SPRUE WAX

Cera para entradas o bebederos

Ideal para:

- Colocación de bebederos con diámetro de 5mm ideal para la disminución de burbujas.








Disponible en:

- Caja 1 lb.
- Caja ½ lb.

ARTICULO C16-01

ARTICULO C16-02

Ceras Usos

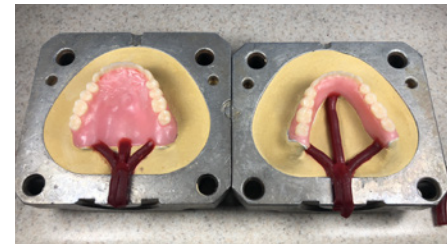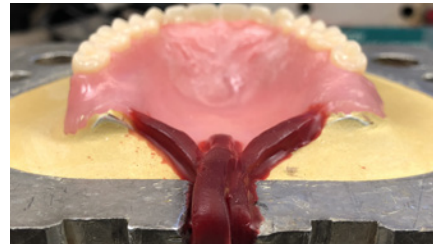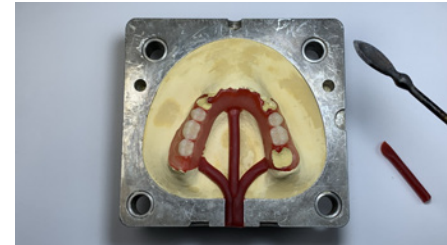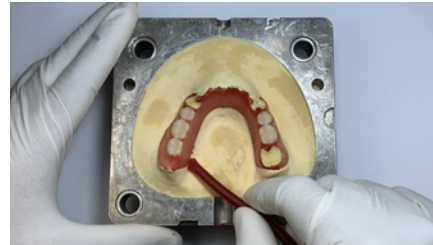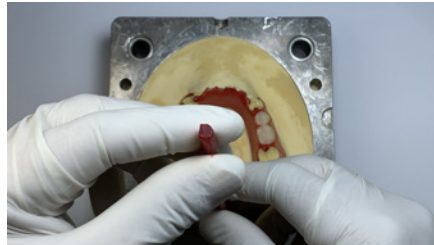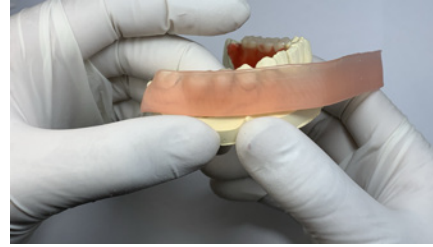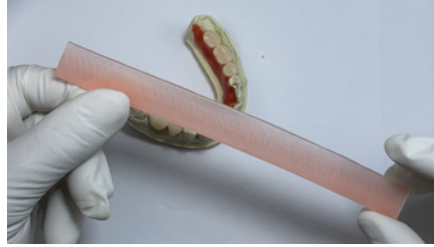



MK DENTAL

flexible, just like you

Contáctenos



+52 (664) 533 9488
+52 (664) 743 1530



mkdentalmexico



mkdentalmexico@gmail.com



@mkdentalmexico



C. 70-76 #24B
Centro Urbano 70-76
C.P. 22410
Tijuana B.C. México

Síguenos:



Distribuidor Autorizado:



