

Manual de horno Mátka Dental

HORNO MK DOBLE #MK02-01

El horno doble MK fue diseñado para laboratorio dentales especializados en prótesis flexibles o semiflexibles con el fin de facilitar la producción de trabajo en el menor tiempo posible.

Esta elaborado para usar cualquier tipo de termoplástico, resinas y/o acrílicos que se derritan por medio de calor, al ser doble calentador puedes programar dos temperaturas distintas para así facilitar el trabajo del usuario; en este caso se puede tener un calentador izquierdo a una temperatura de 287°C y el derecho en 300°C, así alcanzando una máxima temperatura de 400°C, de esta manera se podrá hacer varios inyectado de diferentes materiales con diferentes temperaturas y en menor tiempo, sin necesidad de estar ajustando temperatura de cada horno, o se puede ajustar a una misma temperatura en ambos lados e inyectar en cada calentador del horno con una diferencia de 3-5 min. de margen con cada inyección una misma prensa.

HORNO MK #MK01-01

El Horno MK fue diseñado para laboratorios dentales para una elaboración mas simple y precisa de prótesis flexibles y/o semiflexibles. Este nuevo diseño al ser mas moderno y elegante se ajusta a cualquier espacio de tu

laboratorio, posee un sistema de ventilación al igual que el horno doble MK para darle una vida mas larga a los componentes del horno al mantenerse ventilado.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Colocar MK desmoldante #P30-113 de alta temperatura dentro de calentador y del porta-cartucho antes de encender el horno.
2. Colocar el porta-cartucho dentro del calentador.
3. Encender el horno y fijar en la temperatura deseada.
4. Se recomienda encender el ventilador para mantener ventilada la parte de abajo del horno.
5. **El horno se encuentra en grados Celsius °C.** Para modificar la temperatura solo presionar el botón de SET y entrará a la opción de ajustar temperaturas, si desea subir presionar el botón con la flecha hacia arriba y si desea bajar la temperatura presionar el botón con la flecha hacia abajo. Nunca exceder a 400°C
6. Una vez ajustada la temperatura deseada esperar por lo menos 30 min. antes de la primer inyección.
7. Una vez que la temperatura esté estable podemos empezar a utilizar el horno

8. Se recomienda que cualquier cartucho de cualquier marca del mercado lo deshidrate arriba del horno por lo menos 30 min. para evitar un choque térmico al introducirlo al horno.
9. Antes de introducir el cartucho al horno, colocar Desmoldante MK al rededor el cartucho y posteriormente introducirlo al horno.
10. Una vez introducido el cartucho en el horno, también pondremos desmoldante MK al bronce y lo introducimos al horno y posteriormente ajustamos el tiempo deseado en el temporizador.
11. Cuando el temporizador haya llegado al tiempo podemos hacer la inyección.
12. Después de inyectar debemos esperar por lo menos 3-5 min para la siguiente inyección.



SEGURIDAD Y GARANTÍA

1. Este horno funciona con corriente:
☒ 110v ☒ 220v
2. Conectar a una tomacorriente directa y no usar extensiones caseras.
3. Para reducir el riesgo de incendio, electrocución, lesiones a personas o daño al usar el horno evite remover la etiqueta o cubierta y/o modificar el equipo. En caso de ser alterado se perderá la garantía.
4. Utilizar guantes de protección que soporten alta temperatura.
5. En caso de defecto de fabrica favor de ponerse en contacto con el fabricante o distribuidor mas cercano matkadental@gmail.com enviando su nombre completo, teléfono, numero de serie del horno, fecha de compra, y si es posible un video de la falla o defecto encontrado y se responderá a la brevedad posible.
6. El horno tiene una garantía de 2 años después de su compra siempre y cuando no sea alterado y/o modificado.
7. En caso de garantía el tiempo estimado de reparación y entrega es de 15 a 30 días

dependiendo el tipo de problema y distancia donde se encuentre el equipo, el comprador debe hacer cargo de costos de envío.

8. La garantía solo aplica en defecto de fabrica en sus componentes eléctricos. Esta será excluida cuando el horno presente señales de humedad, alteracion de algun componente, golpe, o mal estado del equipo.
9. El temporizador digital es solo un accesorio extra del horno, al cual no se aplicara en garantía.



Nylon	Flex	Acrylic	Impact
Mufla Fria	Mufla Fria	Mufla Caliente	Mufla Tibia
Temp. 287°C 550°F	Temp. 287°C 550°F	Temp. 300°C 575°F	Temp. 248°C 480°F
Tiempo 11-12 min.	Tiempo 11 min.	Tiempo 18-20 min.	Tiempo 17-20 min.

Distribuidor autorizado Mátka Dental

